



**ご注意**



## -腸内フローラ解析用- 糞便の採取手順 (ブラシ型)






### 腸内フローラ解析用糞便採取キット

キット内容をご確認ください。

- |              |    |
|--------------|----|
| ・採取容器 (液体入り) | 1本 |
| ・採便シート       | 1枚 |
| ・本説明書        | 1枚 |



- ・採取手順に従い、ご使用ください。(直接、肛門に指してのご使用はおやめください。)
- ・容器に亀裂や破損がある場合には、ご使用をおやめください。
- ・保存液が誤って皮膚、粘膜や傷口に付いたり、目や口に入った場合には、水で十分に洗い流してください。直ちに害を与えるものではございませんが、刺激が残る場合は必要に応じて、医師の診察を受けてください。
- ・ブラシの先端は丸みを帯びて、弾力がある構造となっておりますが、細くなっていますので取扱いには十分気を付けてください。
- ・乳幼児やペットの手が届かないところに保管してください。
- ・使用時以外は、蓋を開けず、使用後は速やかに蓋をしてください。
- ・使用前、後の容器は、なるべく横向きや逆さにならないようにして、冷暗所(室温:30℃以下)、または冷蔵庫で保管してください。

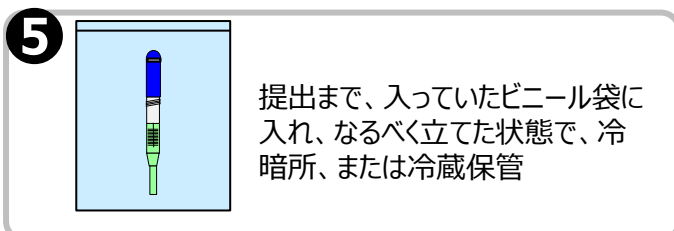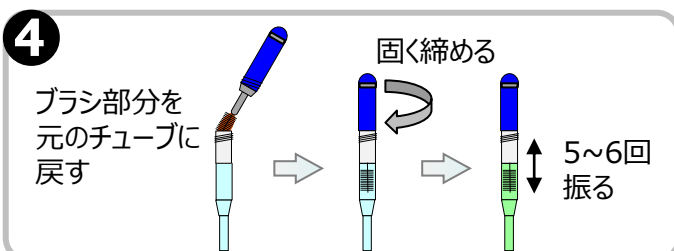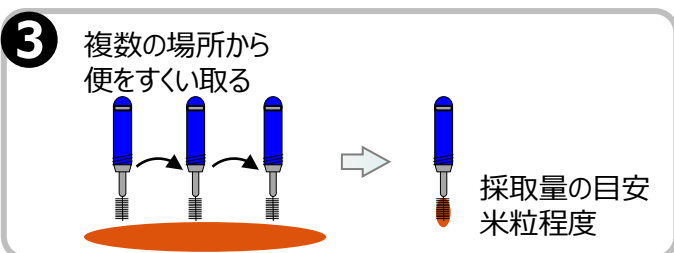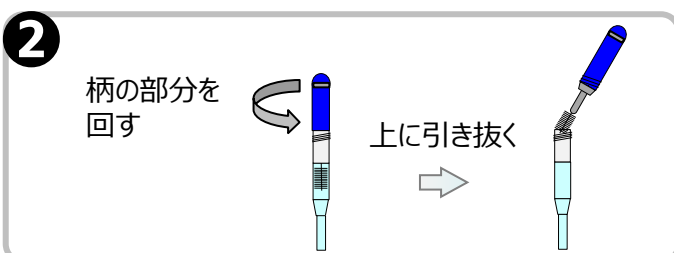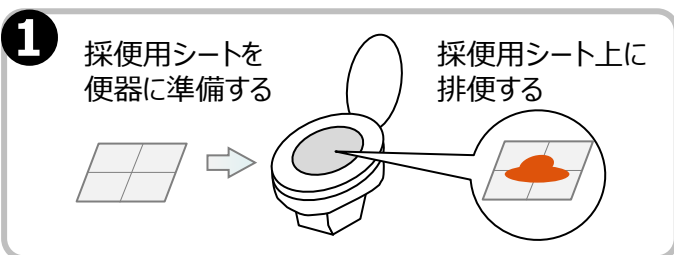

採便シートの「使用上の注意」をよく読んでからご準備ください。

**ご注意** 採便シートを便器に準備する前に、必ず排尿を済ませておいてください。

チューブ内の液がもれないよう採取容器の細い方を下にお持ちください。

ブラシ部分のみに便がつくように、場所を変えながら複数回すくい取ってください。

※ 余分に便を取り過ぎると容器からはみ出しますのでご注意ください。

きちんと密閉されたことをご確認ください。

※ 容器の口に便がつかないようにご注意ください。

※ 液が漏れないようにしっかりと蓋を締めてください。

容器を5~6回振って中身を混ぜてください。

採便容器は、入っていたビニール袋に入れて、なるべく横向きや逆さにならないように、冷暗所(室温:30℃以下)、または冷蔵庫で保管してください。